

Verkorte gebruiksinstructie STAID

Stap 1 Lees voor gebruik van de Staid eerst de volledige gebruiksaanwijzing !!

Stap 2 *Vraag de patiënt om iets naar voren te leunen en positioneer de STAID draagband rond de onderrug van de patiënt met het label aan de buitenkant. Bevestig de gesp en trek deze stevig aan.*

Stap 3 *Door de duwbeugel vast te houden, de voet op de kantelbuis te zetten en de STAID te kantelen, kunt u de STAID verrijden.*

Stap 4 *Rijd de STAID naar de patiënt toe, plaats de voeten op de voetplaat en de onderbenen van de patiënt tegen de beensteunen. Vraag de patiënt indien deze daartoe in staat is, zich aan de handvatten vast te houden.*

Stap 5 *Kies de juiste aanhaakhoogte voor de draagband en haak de lussen van de draagband aan beide kanten achter de haakjes. (beide op zelfde hoogte)*

Stap 6 *Beweeg het til juk van de plafondlift (lees gebruiksaanwijzing tillift !) naar de patiënt en laat het juk voor het hoofd van de patiënt zakken tot net boven de lussen van de tilarmen. Blijf bij het zakken met het juk op veilige afstand van het hoofd van de patiënt.*

Stap 7 *Bevestig de lussen van de STAID aan het til juk.*

Stap 8 *Laat de patiënt zich vasthouden aan de handgreep en vertel wat er gaat gebeuren.*

Stap 9 *Vraag de patiënt om naar achter te leunen tegen de draagband. Beweeg de plafondlift omhoog, zodat de patiënt tot stand gebracht wordt. Moedig de patiënt aan om zoveel mogelijk te assisteren tijdens het proces van opstaan.*

Stap 10 *Maak de transfer. Waarschuwing: til de constructie nooit hoger dan 5 centimeter boven de grond ! Blijf altijd dichtbij de patiënt.*

Stap 11 *Deze stap is alleen van toepassing wanneer kleding en/of incontinentiemateriaal aan of uitgetrokken moeten worden. Laat de constructie met de voetenplaat op de grond staan, dit voorkomt dat de constructie gaat draaien aan de plafondlift.*

Stap 12 *Om de patiënt weer te laten zakken in een zittende positie, laat de plafondlift langzaam zakken en positioneer de patiënt op een bed of in een rolstoel.*

Stap 13 *Verwijder de lussen van het til juk*

Stap 14 *Breng het til juk weg van de patiënt*

Stap 15 *Ontkoppel de lussen van de draagband van het frame.*

Stap 16 *Breng de STAID weg van de patiënt*

Stap 17 *Ontkoppel de gesp en neem de draagband weg.*