

Verkorte gebruiksinstructie STAID

Stap 1 Lees voor gebruik van de Staid eerst de volledige gebruiksaanwijzing !!

Stap 2 Vraag de zorgvrager om iets naar voren te leunen en positioneer de STAID sling rond de onderrug van de zorgvrager met het label aan de buitenkant. Bevestig de gesp en trek deze stevig aan.

Stap 3 Door de duwbeugel vast te houden, de voet op de kantelbuis te zetten en de STAID te kantelen, kunt u de STAID verrijden.

Stap 4 Rijd de STAID naar de zorgvrager toe, plaats de voeten op de voetplaat en de onderbenen van de zorgvrager tegen de beensteunen. Vraag de zorgvrager indien deze daartoe in staat is, zich aan de handvatten vast te houden.

Stap 5 Kies de juiste aanhaakhoogte voor de sling en haak de lussen van de sling aan beide kanten achter de haakjes. (beide op zelfde hoogte)

Stap 6 Beweeg het tiljuk van de plafondlift (lees gebruiksaanwijzing tillift !) naar de zorgvrager en laat het juk voor het hoofd van de zorgvrager zakken tot net boven de lussen van de tilarmen. Blijf bij het zakken met het juk op veilige afstand van het hoofd van de zorgvrager.

Stap 7 Bevestig de lussen van de STAID aan het tiljuk.

Stap 8 Laat de zorgvrager zich vasthouden aan de handgreep en vertel wat er gaat gebeuren.

Stap 9 Vraag de zorgvrager om naar achter te leunen tegen de sling. Beweeg de plafondlift omhoog, zodat de zorgvrager tot stand gebracht wordt. Moedig de zorgvrager aan om zoveel mogelijk te assisteren tijdens het proces van opstaan.

Stap 10 Maak de transfer. Waarschuwing: til de constructie nooit hoger dan 5 centimeter boven de grond ! Blijf altijd dichtbij de zorgvrager.

Stap 11 Deze stap is alleen van toepassing wanneer kleding en/of incontinentiemateriaal aan of uitgetrokken moeten worden. Laat de constructie met de voetenplaat op de grond staan, dit voorkomt dat de constructie gaat draaien aan de plafondlift.

Stap 12 Om de zorgvrager weer te laten zakken in een zittende positie, laat de plafondlift langzaam zakken en positioneer de zorgvrager op een bed of in een rolstoel.

Stap 13 Verwijder de lussen van het tiljuk

Stap 14 Breng het tiljuk weg van de zorgvrager

Stap 15 Ontkoppel de lussen van de sling van het frame.

Stap 16 Breng de STAID weg van de zorgvrager

Stap 17 Ontkoppel de gesp en neem de sling weg.